

Systemkrav för Mindmore

Systemkraven

Mindmore är en webbapplikation och kognitiv testning via Mindmore kan genomföras på de flesta datorer, även på surfplatta. För surfplattor gäller dock endast de som är tillhandahållna av Mindmore. Den rekommenderade utrustningen är dator (laptop eller stationär).

Typ av dator: Laptop eller stationär dator med fungerande mikrofon och högtalare

Skärmstorlek: ≥ 12 tum

Skärmupplösning: $\geq 1024 \times 682$

Webbläsare: Chrome, Firefox eller Edge. Använd helst den senaste versionen.

Inmatningssätt: pekplatta (touchpad) eller extern datormus

Konfiguration / Hantering av testdator

Genomför nedan konfigurationer innan du börjar använda datorn för att genomföra tester med Mindmore. OBS: lämna ej patienten med datorn själv om denna innehåller känslig information såsom journalsystem eller dylikt. Använder patienten din klinikerdator med SITHS-kort skall du se till att du har översikt över patienten vid testtillfället.

1. Välj Chrome, Firefox eller Edge som standardwebbläsare

2. Gör inställningar för ljus och ljud

- Sätt högtalarvolymen på den nivå som ni själva bedömer är lagom på just er dator/laptop.
- Sätt bildskärmens ljusstyrka på den nivå som ni själva bedömer är lagom på just er dator/laptop.

3. Inaktivera notifikationer

Stäng av aviseringar i systeminställningar för att säkerställa att inga meddelanden stör under testning.

4. Inaktivera webbkamera

Av integritetsskäl, säkerställ att webbkameran inte tillåts användas.

5. Anslut till WiFi

Se till att datorn är ansluten till ett stabilt WiFi alternativt LAN-kabel.

6. Laddning / strömförsörjning

Om du använder laptop: Se till att batteriet är helt laddat inför test alternativt ha nätkabeln ansluten på ett säkert sätt.

7. Godkänn användning av mikrofon

Se till att godkänna att mikrofonen används för testapplikationen (<https://app.mindmore.com>) första gången webbsidan används på datorn.

Systemuppdateringar

Se till att de nyaste systemuppdateringarna är installerade för att datorn och Mindmores testapplikation ska fungera optimalt.

Om du har en surfplatta som är tillhandahållen av Mindmore bör denna lämnas på under natten (minst en gång i veckan) med inkopplad laddare samt internetuppkoppling för att denna skall uppdatera systemet automatiskt.